

1. ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirket Adı

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 SA AÇIK ACİL TELEFON NUMARASI
(920) 457-5051

Bilgi Hattı

(920) 457-5051

2. ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı:

Asit Etch Ajanı (Jel/Sıvı)

Ürün Açıklaması:

Adezivler – %37 Fosforik Asit Etch Ajanı

Ürün Parça Numarası:

REF 020-028536 ve REF 020-028535

Materyal:

Fosforik Asit

3. KULLANIM ENDİKASYONLARI, KULLANIM ALANI

Asit Etch Ajanı, diş yapısına ve restoratif materyallere primer/bonding ajanı adezivlerinin adezyonunu artırmak için mineye ve dentine etch işlemi yapma amacıyla kullanılan fosforik asit etch ajanıdır.

4. KONTRENDİKASYONLAR

American Orthodontics ürünlerinin kullanımına engel olabilecek olası komplikasyonların tespit edilmesinden birincil olarak diş hekimi ve/veya ortodontist sorumludur.

5. UYARILAR

Asit Etch Ajanı fosforik asit içerir ve aşındırıcıdır. Gözler, mukoza zarı ve ciltle temastan kaçının. American Orthodontics SDS "Fosforik Asit" belgesine başvurun.

Asit Etch Ajanı, Bakır Polifitalosiyanın ve Kuinolin Sarı/FD&C Sarı No. 10 içermektedir. Bu boyalara karşı hassasiyeti veya alerjisi olan hastalar bu ürüne temas etmemelidir.

6. YAN ETKİLER

Kullanım sırasında görülen istenmeyen yan etkiler arasında alerjik reaksiyon ile hafif rahatsızlık ve ağrı olabilir.

7. TEDAVİ ÖNCESİ İŞLEMLER

1. Polisaj lastiği veya fırçası takılı bir döner alet kullanarak bonding yapılacak mine yüzeyine/yüzeylerine profilaksi pastası uygulayın.
2. Yağ içerikli profilaksi pastalarını kullanmayın. Bu pastalar ince bir tabaka bırakarak etch işlemi engelleyebilir.
3. Dişleri iyice yıkayıp yağsız/nemsiz basınçlı hava ile kurutun.

8. ADIM ADIM TALİMATLAR

NOT: Diğer jel etch sistemlerini kullanıyorsanız üreticinin kullanma talimatlarına bakın. Aşağıdaki işlem sadece American Orthodontics'in Asit Etch Ajanı için geçerlidir.

1. Asit Etch Ajanını karıştırma pedine dağıtın.
2. Etch yapılacak dişi izole edin.
3. Asit Etch Ajanını bonding yapılacak alanın tamamına hafif kompres yaparak uygulayın. Asit Etch Ajanını mineye ovarak uygulamayın. Asit Etch Ajanını yumuşak dokuya uygulamaktan kaçının.
4. Etch için 30 saniye bekleyin (süt dişlerinde 60 saniye).
5. Etch işlemine son vermek için her dişi 10 saniye suyla yıkayın/her dişe hava spreyi uygulayın (jel etch ajanında 20 saniye). Etch uygulanan alan kırılganlaşmış görünümde, beyaz renkli olmalıdır. Değilse 10 – 15 saniye yeniden etch yapın.
6. Demineralize partikülleri uzaklaştırın.

9. SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI

Saklama

- Kabın ağzını sıkıca kapatın.
- 10°C–25°C (50°F–77°F) arasında saklayın.
- Oda sıcaklığında raf ömrü son kullanma tarihine uygundur. Raf ömrünü optimize etmek için stok rotasyonu yapın.

Taşıma

- 10°C–25°C (50°F–77°F) arasında taşıyın.
- Sert taşıma koşulları ürüne zarar verebilir.


10. BERTARAF EDİLİRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Az miktarda Asit Etch Ajanı bol miktarda su ile giderden tahliye edilebilir. Daha büyük miktarlar yerel yasalar/eyalet yasaları doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Kurallara uygun olarak iyice temizlenen boş ambalajlar geri dönüştürülebilir.

11. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alıcının mal veya hizmetteki her tür kusurdan doğan tazminat talebine ilişkin başvurabileceği çözüm yolu, bahse konu ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi (satıcının tercihinine bağlı olarak) veya bahse konu ürünün satış fiyatının geri ödenmesi ile sınırlıdır. Satıcı, hiçbir koşulda, satıcı tarafından tedarik edilen mal veya hizmetlerle ilgili olarak alıcının uğradığı kâr kaybı da dâhil olmak üzere dolaylı veya arızî hasarlardan sorumlu olmaz. Hasar veya eksiklik talepleri, sipariş tesliminden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilmelidir.

12. RUHSAT BİLGİLERİ

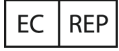

MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Almanya



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



KULLANMA TALİMATLARINA BAŞVURUN



UYARI AŞINDIRICIDIR



STERİL DEĞİLDİR



DİKKAT– KULLANMA TALİMATLARINA BAŞVURUN



10°–25°C (50°F – 77°F) ARASINDA SAKLAYIN

CE 0843

SEMBOL AÇIKLAMALARI İÇİN BKZ. WWW.AMERICANORTHO.COM

DİKKAT: FEDERAL YASALAR UYARINCA BU CİHAZ SADECE DİŞ HEKİMLERİNE/ORTODONTİSTLERE VEYA ONLARIN TALİMATI ÜZERİNE SATILABİLİR.

Kullanma Talimatlarında yer alan bilgilerin geçerli ve doğru olduğu kabul edilmektedir. Ancak American Orthodontics, verilen bilgilerin olası her koşulda eksiksiz olduğuna ilişkin açık veya zımni garanti vermez. **Makul güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır.**